


Bedienungsanleitung

TV Adapter 2.0

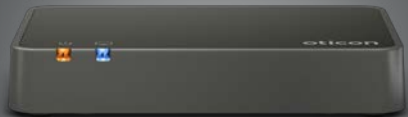

Einleitung zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Anleitung unterstützt Sie bei der Bedienung und Pflege Ihres neuen TV Adapters. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, insbesondere auch den Abschnitt **Warnhinweise**. Das wird Ihnen helfen, das volle Potenzial Ihres neuen TV Adapters nutzen zu können.

Wenn Sie weitere Fragen zum Gebrauch Ihres TV Adapters haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Hörakustiker.

| Übersicht | [Inbetriebnahme](#) | [Handhabung](#) | [Warnhinweise](#) | [Zusätzliche Informationen](#) |

Über die Menüleiste gelangen Sie schnell und bequem zu den gewünschten Abschnitten.

Verwendungszweck

Verwendungszweck	Der TV Adapter 2.0 ist für eine Verwendung mit Wireless-Hörssystemen und dem Streamer Pro gedacht. Er ermöglicht es dem Hörsystemnutzer, den Ton des Fernsehers vom TV Adapter über den Streamer Pro direkt an das Hörsystem zu übertragen.
Indikationen für die Verwendung	Keine Angaben zur Verwendung.
Vorgesehener Nutzer	Erwachsene und Kinder älter als 36 Monate.
Anwendungsumgebung	Innenbereiche.
Kontraindikationen	Keine Kontraindikationen.
Klinische Vorteile	Siehe klinische Vorteile des Hörsystems.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht

Packungsinhalt	6
TV Adapter Übersicht	8

Inbetriebnahme

Installation	10
Platzierung des TV Adapters	12
Verbindung mit dem Netzstrom	14
Verbindung mit dem TV-Gerät	16
Verbindung über TOSLINK	18
Verbindung über RCA	20
Verbindung über Mini-Klinkenadapter	22
Verbindung über SCART	24
Kopplung des Streamer Pro mit dem TV Adapter	26

Handhabung

Lautstärkeregelung	30
Fernsehen starten	32
SelectMe - Verwendung mehrerer TV Adapter	34
Pflege des TV Adapters	36

Warnhinweise

Warnhinweise	38
--------------	----

Zusätzliche Informationen

Nutzungsbedingungen	40
Technische Information	41

Packungsinhalt


Im Lieferumfang sind die folgenden Komponenten enthalten:



TV Adapter 2.0



Dieses Handbuch
(Bedienungsanleitung)

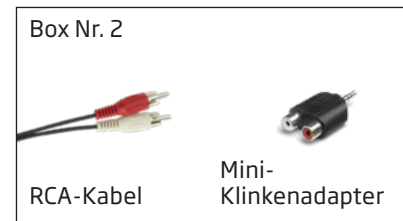


TV Adapter Übersicht

Status	Power-Anzeige	TV-Status-Anzeige
TV Adapter AN, keine Verbindung zum Streamer Pro		
Im Kopplungsmodus		
Streaming - kein Audiosignal erkannt		
RCA-Kabel angeschlossen und Streaming		
TOSLINK-Kabel angeschlossen und Streaming (digital)		
TOSLINK-Kabel angeschlossen und Streaming (ungültiges Signal)*		
Fehlermeldung **		

○ Kein Licht ● Blinken ● Konstant

* Versuchen Sie es mit einer anderen Eingangsverbindung

** Wenden Sie sich an Ihren Hörakustiker

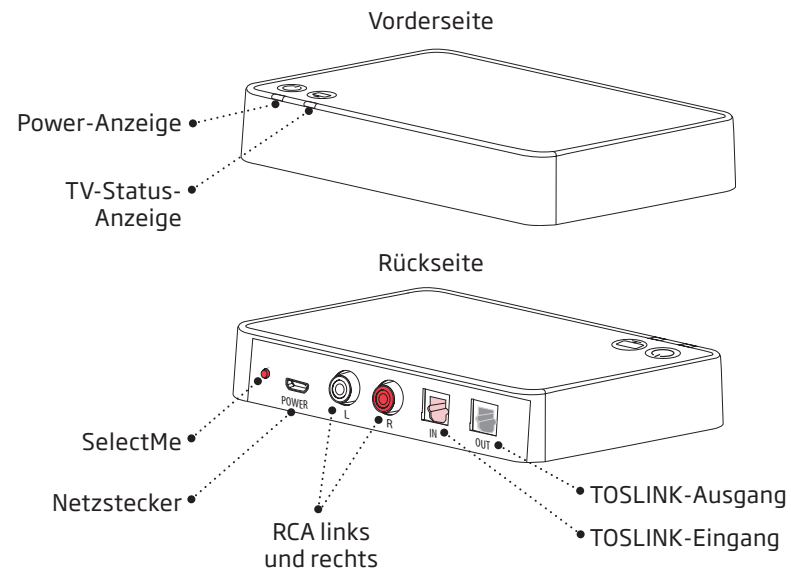

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.oticon.de/connectline

Installation

Erstmaliger Gebrauch des TV Adapters

Bevor Ihr Streamer Pro und Ihre Hörsysteme den TV-Ton empfangen können, muss der TV Adapter an den Fernseher und das Stromnetz angeschlossen und mit Ihrem Streamer Pro gekoppelt werden.

Diese Anleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie den TV Adapter installieren.

Im Lieferumfang sind alle Teile enthalten, die Sie für die Installation benötigen.



WICHTIGER HINWEIS

Ausführliche Hinweise zum Funktionsumfang Ihres Hörsystems finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.

Platzierung des TV Adapters


Es gibt zwei Möglichkeiten, den TV Adapter zu platzieren:

1. In der Nähe des Fernsehers - horizontal platziert (A).
2. Hinter dem Fernseher oder in dessen Nähe an der Wand platziert (vertikal) (Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten) (B).

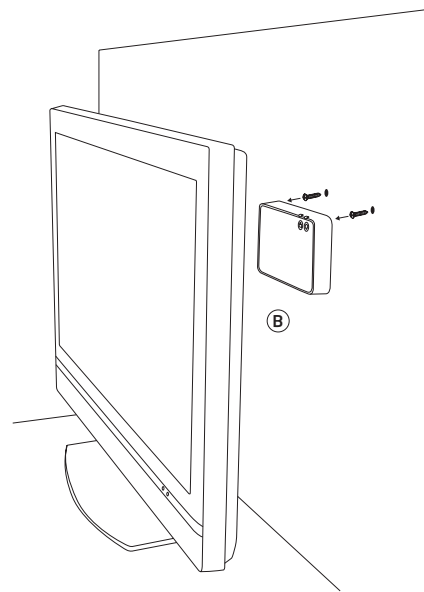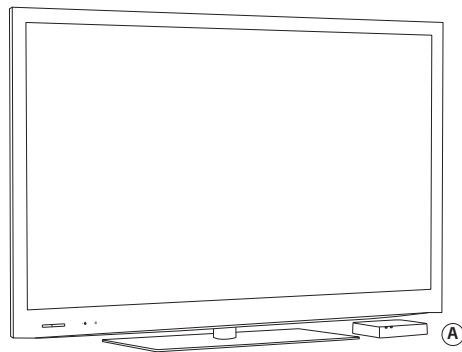


Verbindung mit dem Netzstrom

Nutzen Sie den Netzstecker aus der Box Nr. 1.

1. Stecken Sie das Netzkabel in den „Power“-Anschluss auf der Rückseite des TV Adapters (A).
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose (B) (und drücken Sie den Einschaltknopf).
3. Nach wenigen Sekunden wird die Power-Anzeige  auf der Vorderseite des TV Adapters (C) grün aufleuchten.

WICHTIGER HINWEIS

Verwenden Sie zum Laden des TV Adapters das mitgelieferte Original-Netzteil mit 5,0 V/1 A, CE-Kennzeichnung und Sicherheitszeichen.

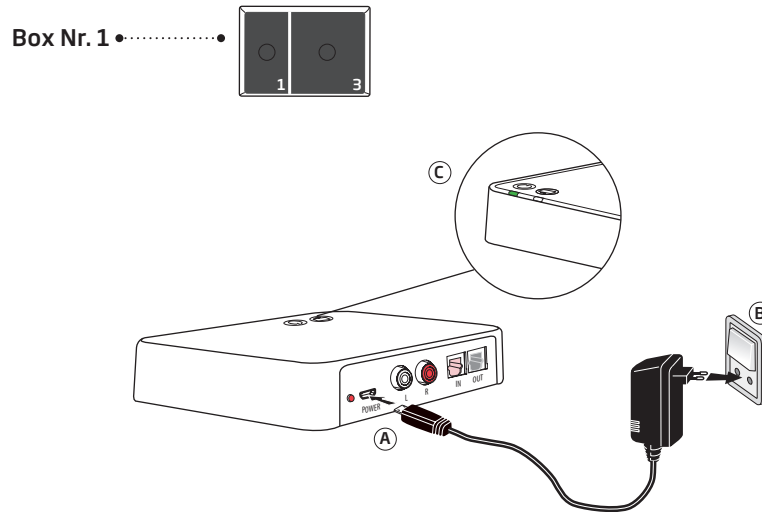

Verbindung mit dem TV-Gerät

Es gibt vier Möglichkeiten, den TV Adapter mit dem Fernseher zu verbinden.


Verbindung	Seite
TOSLINK. Entweder Digital Stereo (PCM) oder Dolby® Digital *	18
RCA Audioausgang L+R	20
Mini-Klinken-Ausgang (üblicherweise der Kopfhörerausgang)	22
SCART-Audioausgang (L+R)	24

* Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories.


Bitte machen Sie sich zur Gewährleistung der Kompatibilität mit den detaillierten technischen Daten des ConnectLine TV Adapters 2.0 (www.oticon.de/connectline) sowie den technischen Daten und Bedienungshinweisen zu Ihrem Fernseher vertraut.

Eine Lösung, die für Ihren Fernseher passt, finden Sie auf den nächsten Seiten.


TOSLINK (S. 18)

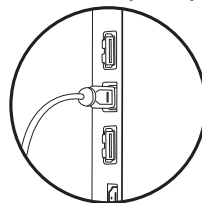


RCA (S. 20)

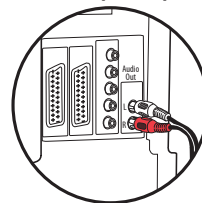

Mini-Klinke (S. 22)

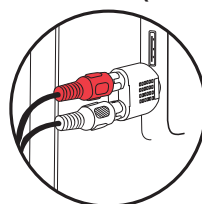

SCART (S. 24)

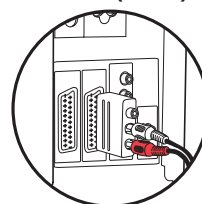

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.oticon.de/connectline


Verbindung über Toslink

1. Nutzen Sie das TOSLINK-Kabel aus der Box Nr. 3 (A).
2. Entfernen Sie die Plastikkappe vom TOSLINK-Kabel. (B)
3. Verbinden Sie das TOSLINK-Kabel mit dem TOSLINK-Ausgang Ihres Fernsehers oder Heimkinosystems (C).
4. Stecken Sie das TOSLINK-Kabel in den rosafarbenen TOSLINK-Eingang (D) des TV Adapters.
5. Der TOSLINK-Ausgang (E) kann für den Anschluss anderer TOSLINK-Geräte verwendet werden, wie beispielsweise externer Dolby®-Decoder und Surround Sound-Systeme.
6. Informationen zur Kopplung des TV Adapters mit dem Streamer Pro finden Sie auf Seite 26.

Hinweis

Möglicherweise muss Ihr Fernseher, Ihr DVD-Player oder Ihr Heimkinosystem so konfiguriert werden, dass am TOSLINK-Ausgang das richtige Audioformat verfügbar ist.

Wenn Sie einen anspruchsvolleren oder komplexeren Aufbau haben, können Sie auch den Supportbereich unter www.oticon.de/connectline nutzen.

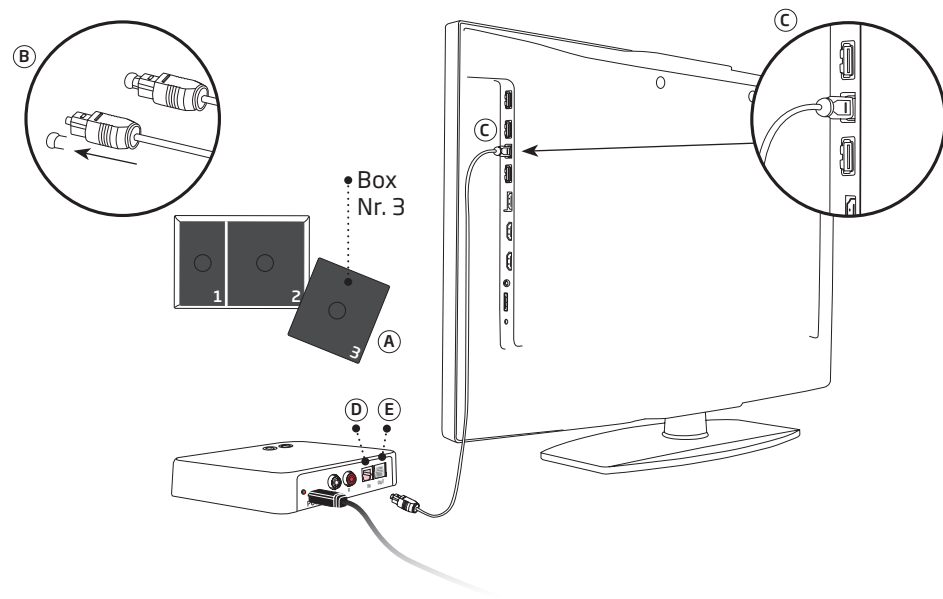


Verbindung über RCA

1. Nutzen Sie das RCA-Kabel aus der Box Nr. 2 (A).
2. Verbinden Sie das RCA-Kabel mit dem RCA-Ausgang am Fernseher (B) oder dem Heimkinosystem. (Typischerweise mit „L - R AUDIO OUT“ gekennzeichnet und häufig auf der Rückseite des Fernsehers oder am Bedienfeld auf der Vorderseite platziert).
3. Stecken Sie das RCA-Kabel in den RCA-Eingang (C) auf der Rückseite des TV Adapters.
4. Informationen zur Kopplung des TV Adapters mit dem Streamer Pro finden Sie auf Seite 26.

Hinweis

Möglicherweise muss Ihr Fernseher so konfiguriert werden, dass am RCA-Ausgang das richtige Audioformat verfügbar ist.

Wenn Sie einen anspruchsvolleren oder komplexeren Aufbau haben, können Sie den Supportbereich unter www.oticon.de/connectline nutzen.

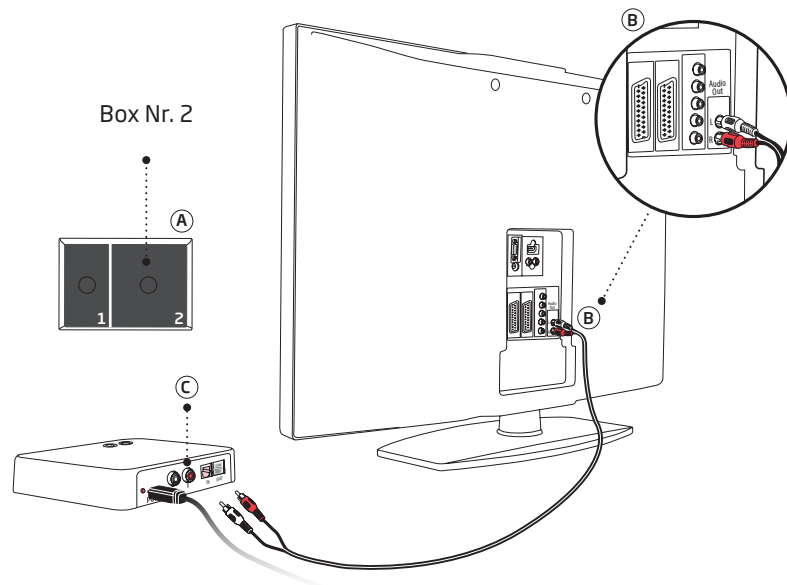


Verbindung über Mini-Klinkenadapter

1. Den Mini-Klinkenadapter finden Sie in der Box Nr. 2 (A).
2. Verbinden Sie das RCA-Kabel mit dem Mini-Klinkenadapter (B1).
3. Schließen Sie den Mini-Klinkenadapter an den Fernseher an. Dies erfolgt normalerweise über den Kopfhörerausgang (B2) des Fernsehers.
4. Schließen Sie das RCA-Kabel an den RCA-Eingang (C) des TV Adapters an.
5. Informationen zur Kopplung des TV Adapters mit Ihrem Streamer Pro finden Sie auf Seite 26.

Hinweis

Es kann sein, dass die Lautsprecher des Fernsehers stumm geschaltet werden, wenn Sie den Kopfhörerausgang benutzen. In diesem Fall empfangen Sie den TV-Ton nur über den Streamer Pro/TV Adapter.

Wenn Sie einen anspruchsvolleren oder komplexeren Aufbau haben, können Sie den Supportbereich unter www.oticon.de/connectline nutzen.

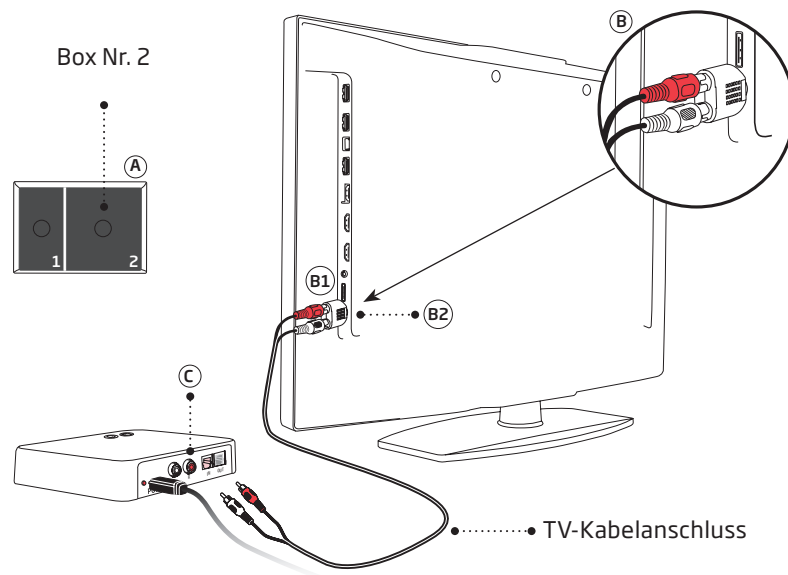

Verbindung über SCART


1. Verwenden Sie einen SCART-Adapter*. (A)
2. Verbinden Sie den roten und den weißen Stecker des RCA-Kabels mit den entsprechenden Buchsen am SCART-Adapter (B).
3. Stecken Sie den SCART-Adapter in den SCART-Anschluss des Fernsehers (C).
4. Schließen Sie das RCA-Kabel an den RCA-Eingang (D) des TV Adapters an.
5. Informationen zur Kopplung des TV Adapters mit Ihrem Streamer Pro finden Sie auf Seite 26.

Hinweis

Möglicherweise ist die Audioausgabe am SCART-Anschluss abhängig von der am Fernseher ausgewählten Quelle. Beispiel: Einige Fernseher stellen den Fernsehton nur über den SCART-Ausgang bereit (d.h. Ton von einem angeschlossenen DVD-Player).

Wenn Sie einen anspruchsvolleren oder komplexeren Aufbau haben, können Sie den Supportbereich unter www.oticon.de/connectline nutzen.

Der SCART-Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie einen SCART-Adapter benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Hörakustiker.

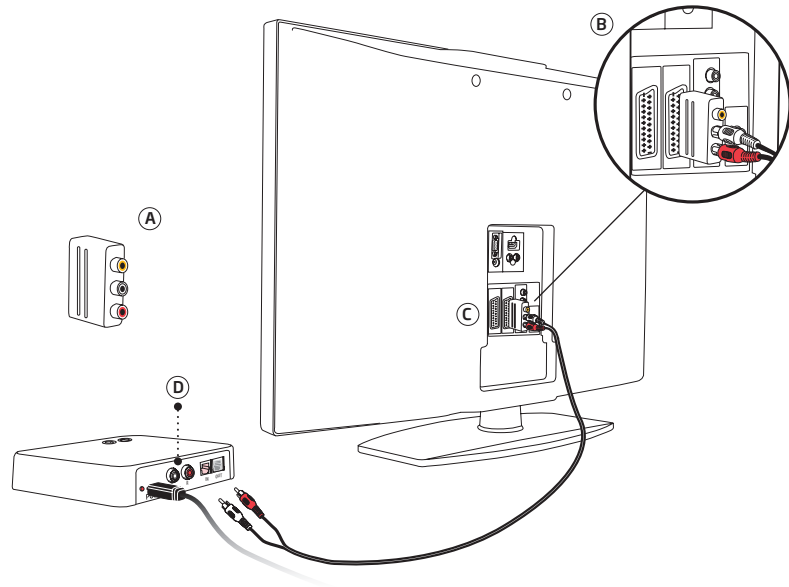


Kopplung des Streamer Pro mit dem TV Adapter









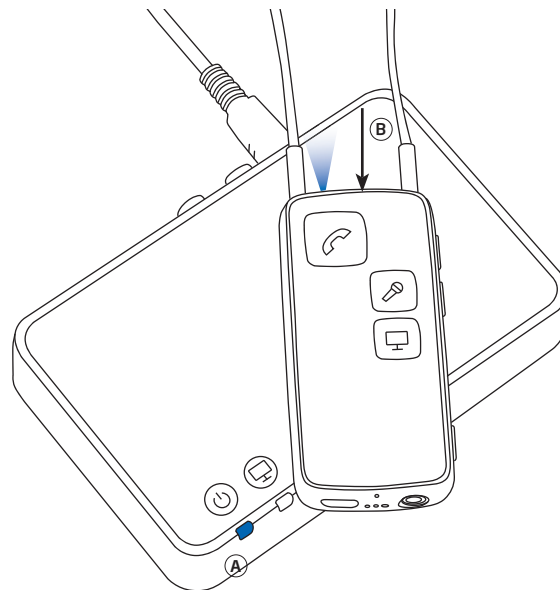






















Bevor Sie den Streamer Pro mit dem TV Adapter nutzen können, müssen Sie ihn mit Ihrem TV Adapter koppeln.

Kopplung:

1. Stellen Sie sicher, dass der TV Adapter eingeschaltet ist und die Power-Anzeige konstant grün leuchtet.
2. Drücken Sie die An-/Aus-Taste am Streamer Pro (B) für 5-6 Sekunden, bis das blaue Licht zu blinken beginnt (A).
3. Halten Sie den Streamer Pro über den TV Adapter oder in dessen Nähe. Die Kopplung nimmt ca. 20-60 Sekunden in Anspruch. Der TV Adapter beginnt automatisch mit der Kopplung.
4. Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn die Power-Anzeige am TV Adapter und die Status-Anzeige am Streamer Pro kurzzeitig blau und anschließend orange aufleuchten.

Die Kopplung erfolgt einmalig und muss in der Regel nicht wiederholt werden.



Kopplung			
Streamer Pro Oberseite	Streamer Pro Vorderseite	TV Adapter	Beschreibung
 		 	Streamer Pro und TV Adapter sind AN
 		 	Streamer Pro ist im Kopplungsmodus
  		 	Kopplung ist abgeschlossen
  		 	Streaming - kein Audiosignal erkannt
  		 	RCA-Kabel angeschlossen und Streaming
  		 	TOSLINK-Kabel angeschlossen und Streaming (digital)

 Konstant  Blinkend

Lautstärkeregelung

Verwenden Sie die Lautstärketaster an Ihrem Streamer Pro, um die Lautstärke des TV-Signals in beiden Hörsystemen zu steuern. Sie regeln die Lautstärke, indem Sie einmal kurz oben oder unten den Taster drücken. Durch wiederholtes kurzes Drücken können Sie die Lautstärke nach Bedarf anpassen.


Stummschalten

Während des Fernsehens können Sie die Hörsysteme-Mikrofone ausschalten, sodass Sie nur das TV-Signal hören.

Drücken Sie beide Lautstärketaster gleichzeitig, bis der Umgebungsklang stummgeschaltet ist. Sie hören einen Bestätigungston, der darauf hinweist, dass die Mikrofone in den Hörsystemen jetzt stummgeschaltet sind.

Hinweis

Die Lautstärke, mit der der Ton des Fernsehers über die Hörsysteme wiedergegeben wird, wird normalerweise nicht durch Lautstärkeänderungen beeinflusst, die Sie mit der Fernbedienung des Fernsehers vornehmen.

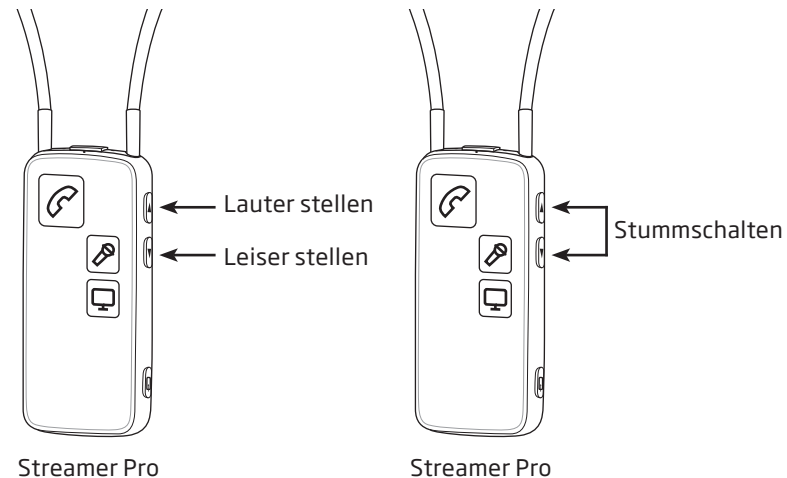


Fernsehen starten

Tragen Sie den Streamer Pro mit dem Halsgurt um den Hals und stellen Sie sicher, dass der Streamer Pro eingeschaltet ist.

Übertragung des Fernsehtons starten

Drücken Sie kurz die TV-Taste auf der Vorderseite des Streamer Pro. Der Streamer Pro verbindet sich mit dem TV Adapter. Nach einigen Sekunden leuchten Streamer Pro und TV Adapter konstant orange auf. Sie hören einen Signalton in Ihren Hörsystemen, gefolgt vom Audiosignal des verbundenen Fernsehers.

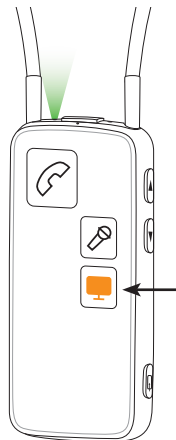

Übertragung des Fernsehtons stoppen

Drücken Sie kurz die TV-Taste auf der Vorderseite des Streamer Pro. Die orangefarbenen Leuchten am Streamer Pro und am TV Adapter gehen aus. Sie hören einen Bestätigungston in Ihren Hörsystemen.

Kopplung			
Streamer Pro Oberseite	Streamer Pro Vorderseite	TV Adapter	Beschreibung
			Streamer Pro und TV Adapter sind AN
			Streaming - kein Audiosignal erkannt
			RCA-Kabel angeschlossen und Streaming
			TOSLINK-Kabel angeschlossen und Streaming (digital)




SelectMe - Verwendung mehrerer TV Adapter

Mit einem Streamer Pro der Version 1.1 oder höher haben Sie die Möglichkeit, mehrere TV Adapter zu verwenden, z.B. einen im Wohnzimmer und einen im Schlafzimmer.

Umschalten zwischen den TV Adaptern:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht mit einem TV Adapter verbunden sind. Der Streamer Pro sollte eingeschaltet, jedoch nicht aktiv sein.
2. Drücken Sie kurz auf die SelectMe-Taste desjenigen TV Adapters, über den Sie hören möchten (A).
3. Der TV Adapter wird automatisch verbunden. Sie hören einen Signalton in Ihren Hörsystemen, gefolgt vom TV-Signal des verbundenen Fernsehers.

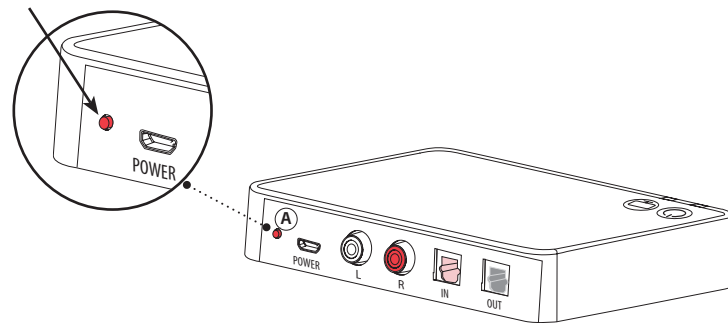

Pflege des TV Adapters

Reinigen Sie den TV Adapter mit einem weichen, trockenen Tuch.

WICHTIGER HINWEIS

Der TV Adapter darf keinesfalls gewaschen oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.

Warnhinweise

Um Ihre Sicherheit und eine korrekte Verwendung zu gewährleisten, sollten Sie sich vor der Verwendung des TV Adapters umfassend mit den folgenden allgemeinen Warnhinweisen vertraut machen. Wenden Sie sich an Ihren Hörakustiker, wenn Ihr TV Adapter während der Verwendung nicht erwartungsgemäß funktioniert oder aufgrund der Verwendung schwerwiegende Zwischenfälle auftreten. Ihr Hörakustiker kann Sie bei Störungen unterstützen und diese an den Hersteller und/oder nationale Behörden melden, sofern erforderlich.

Brandgefahr

Die Spannungsquelle des TV Adapters führt nicht genügend Energie, um unter normalen Bedingungen ein Feuer zu verursachen.

Interferenzen

Der TV Adapter wurde nach den strengsten internationalen Standards auf mögliche

Interferenzen getestet. Dennoch kann es geschehen, dass zwischen dem TV Adapter und anderen Geräten Interferenzen auftreten. Vergrößern Sie in diesem Fall den Abstand zwischen dem TV Adapter und der Störquelle.

Verbindung mit externen Geräten

Die Sicherheit der Verwendung eines TV Adapters, der mit einem AUX-Eingangskabel an ein externes Gerät angeschlossen ist, wird durch die externe Signalquelle bestimmt. Bei Verbindung des Geräts mit einem netzbetriebenen externen Gerät muss dieses Gerät die Norm IEC-62368-1 oder vergleichbare Sicherheitsnormen erfüllen.

Inkompatibles nicht mitgeliefertes Zubehör

Verwenden Sie nur Zubehör, Umwandler oder Kabel, die vom Hersteller geliefert wurden. Inkompatibles Zubehör kann die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Ihres Geräts verringern.

Nutzungsbedingungen

Betriebsbedingungen	Temperatur: +5°C bis +40°C Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 93 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa
Lager- und Transportbedingungen	Temperatur und Luftfeuchtigkeit sollten die nachstehenden Grenzwerte über einen längeren Zeitraum bei Transport und Lagerung nicht überschreiten. Temperatur: -25 °C bis +70 °C Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 93 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa

Technische Information

Modellbezeichnung	BS-F200
-------------------	---------

Der TV Adapter 2.0 enthält einen Bluetooth-Funksender, der auf 2,4 GHz arbeitet. Der Funksender ist schwach und liegt immer unter 10mW, was einem Wert von 10 dBm Gesamtstrahlungsleistung entspricht.

Der TV Adapter erfüllt die internationalen Normen bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit und der Belastung des Menschen durch elektromagnetische Funkwellen.

Aufgrund der geringen Baugröße des TV Adapters sind alle für die Zulassung notwendigen Kennzeichnungen in diesem Handbuch abgedruckt.

Zusätzliche Informationen finden Sie im Datenblatt, das unter www.oticon.de abgerufen werden kann.

USA und Kanada

Das Gerät enthält ein Funkmodul mit den folgenden Zertifizierungsnummern:

FCC ID: U28TVBOX03

IC: 1350B-TVBOX03

Das Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien und den lizenzfreien RSSs der kanadischen Industrie.

Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

1. dieses Gerät erzeugt keine gesundheitsgefährdenden Interferenzen, und

2. dieses Gerät muss auch den Einfluss jeglicher Interferenzen durchhalten, auch wenn diese zu unerwünschtem Verhalten führen.

Hinweis: Änderungen oder Manipulationen, die am Gerät vorgenommen werden und die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt worden sind, die für die Konformität verantwortlich ist, können dazu führen, dass die Genehmigung zum Betrieb des Gerätes erlischt.

Dieses Digitalgerät der Klasse B entspricht allen Anforderungen der kanadischen Vorschriften ICES-003.

In Tests wurde bestätigt, dass das Gerät die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B entsprechend Teil 15 der FCC-Normen erfüllt. Diese Grenzwerte sind für die Gewährleistung eines angemessenen Schutzes gegen Interferenzen im Wohnbereich gedacht. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Hochfrequenzenergie ab. Wird es nicht entsprechend den Vorschriften genutzt, kann es den Rundfunkempfang erheblich beeinträchtigen. Störungen können im Einzelfall jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Sollte dieses Gerät den Rundfunk- oder Fernsehempfang stören, was durch vorübergehendes Ausschalten des Geräts überprüft werden kann, versuchen Sie, die Störungen durch mindestens eine der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder umsetzen.
- Entfernung zwischen TV Adapter und Empfänger vergrößern.
- Den TV Adapter an die Steckdose eines Stromkreises anschließen, an dem nicht der Radio- oder Fernsehempfänger angeschlossen ist.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio/TV-Techniker um Rat fragen.

Internationale Garantie

Ihr Gerät verfügt über eine auf 12 Monate befristete internationale Garantie auf Material und Ausführung, beginnend ab dem Zeitpunkt der an Sie erfolgenden Lieferung. Diese eingeschränkte Garantie bezieht sich nur auf Herstellungs- und Materialfehler des Geräts, nicht jedoch auf Zubehör wie Batterien, Kabel, Netzteile usw. Probleme, die durch falsche/unsachgemäße Handhabung oder Pflege, übermäßigen Gebrauch, Unfälle, Reparaturen durch Unbefugte, Verwendung unter hoher Korrosionsbelastung, Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät oder fehlerhafte Einstellungen entstehen, sind durch die eingeschränkte Garantie NICHT abgedeckt oder können zu deren Verlust führen. Im Rahmen dieser Garantie wird der Hersteller nach eigenem Ermessen entscheiden, ob das Gerät repariert oder durch ein entsprechendes Modell ersetzt wird.

Die genannte Garantie berührt nicht die gesetzlichen Rechte, die Sie möglicherweise nach den geltenden nationalen Rechtsvorschriften für den Verkauf von Konsumgütern haben. Ihr Hörakustiker hat möglicherweise eine Garantie ausgestellt, die über die Bestimmungen dieser beschränkten Garantie hinausgeht. Bitte konsultieren Sie ihn für weitere Informationen.

Wenn Sie Service benötigen

Gehen Sie mit dem Gerät zu Ihrem Hörakustiker, der in der Lage sein kann, kleinere Probleme sofort zu beheben oder Einstellungen anzupassen. Ihr Hörakustiker kann Ihnen behilflich sein, wenn Sie die Garantieleistung des Herstellers in Anspruch nehmen möchten. Für seine Dienstleistungen kann Ihr Hörakustiker eine Gebühr verlangen.

Der Hersteller erklärt hiermit, dass dieser TV Adapter 2.0 (BS-F200) die wesentlichen Anforderungen und sonstigen zutreffenden Bestimmungen der Direktive 2014/53/EG erfüllt.



Bitte beachten Sie die lokalen Bestimmungen zur Entsorgung elektronischer Geräte.

Die Konformitätserklärung erhalten Sie beim Hersteller.



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dänemark
www.oticon.de



Complies with
IMDA Standards
DA103820

Beschreibung der in dieser Broschüre verwendeten Symbole



Warnhinweise

Text, der mit einem Warnsymbol gekennzeichnet ist, muss vor der Verwendung des Geräts gelesen werden.



Hersteller

Das Gerät wird vom Hersteller hergestellt, dessen Name und Anschrift neben dem Symbol angegeben sind. Gibt den Hersteller des Medizinproduktes an, wie in den EU-Verordnungen 2017/745 und 2017/746 festgelegt.



CE-Zeichen

Das Gerät erfüllt alle erforderlichen EU-Vorschriften und Richtlinien.



Elektronikschrott (WEEE)

Recyceln Sie Hörsysteme, Zubehör oder Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen. Benutzer von Hörsystemen können Elektronikschrott auch zur Entsorgung an ihren Hörakustiker zurückgeben. Elektronische Geräte, die unter die Richtlinie 2012/19 / EU über Abfälle und elektrische Geräte (WEEE) fallen.



Regulatory Compliance Mark (RCM)

Das Gerät erfüllt die Anforderungen für elektrische Sicherheit, EMV und Funkfrequenzen für Geräte, die an den australischen oder neuseeländischen Markt geliefert werden.



Doppelisolierung

Zeigt an, dass die Stromversorgung des Produkts doppelt isoliert ist. Dadurch besteht nur ein sehr geringes Risiko von einzelnen Ausfällen. Im Grunde sind einzelne Ausfälle unmöglich.



Verwendung in Innenräumen

Zeigt an, dass das Produkt für die Verwendung in Innenräumen geeignet ist.

Singapurisches IMDA-Label

Complies with
IMDA Standards
DA103820

Gibt an, dass das Gerät den Normen und Daten entspricht, die von der Info-Communications Media Development Authority (IMDA) herausgegeben wurden, mit den öffentlichen Telekommunikationsnetzwerken in Singapur kompatibel ist und keine Funkfrequenzstörquelle für andere autorisierte Funknetzwerke darstellt.

Beschreibung der zusätzlichen Symbole auf den Etiketten



Trocken lagern

Weist auf ein Medizinprodukt hin, das vor Feuchtigkeit geschützt werden muss.



Warnsymbol

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung für Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen.



Katalognummer

Gibt die Katalognummer des Herstellers an, damit das Medizinprodukt identifiziert werden kann.



Seriennummer

Gibt die Seriennummer des Herstellers an, damit ein bestimmtes Medizinprodukt identifiziert werden kann.



Medizinisches Gerät

Das Gerät ist ein Medizinprodukt



Stromversorgung

Gibt die Stromfrequenz an, mit der die Stromzufuhr vom Stromnetz (Steckdose) zu Ihrem Gerät erfolgt.

Beschreibung der zusätzlichen Symbole auf den Etiketten

	Südafrikanisches ICASA-Label Gibt an, dass das Gerät für einen Vertrieb in Südafrika lizenziert ist.
	Japanisches TELEC-Symbol Stellt eine Kennzeichnung für zertifizierte Funkausrüstung dar.
	Brasilianisches ANATEL-Label Gibt an, dass das Gerät in Brasilien zertifiziert und genehmigt ist.
	Koreanisches Zertifizierungskennzeichen (KC) Das Gerät entspricht den koreanischen Vorgaben zur Produktsicherheit für elektrische und elektronische Geräte.
	NCC-Symbol Taiwanische Zertifizierung der National Communications Commission (NCC) für Kommunikationsinformationsgeräte.

219986DE / 2020.03.10

219986DE / 2020.03.10



oticon
life-changing technology

219986DF / 2020.03.10